



OPATRUNEK NA OPARZENIA

30498


Sterylny opatrunek na oparzenia z hydrożelem

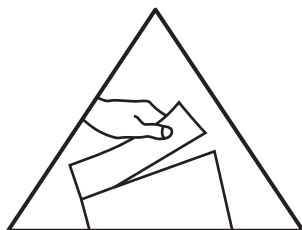


Otwórz opakowanie

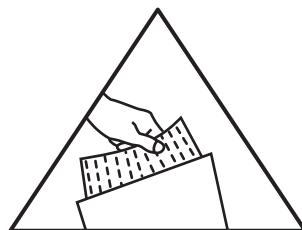

Wymij opatrunek

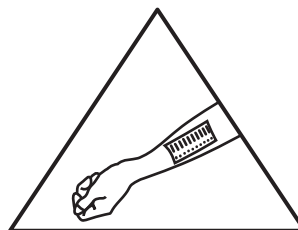

Przyłóż w oparzone miejsce

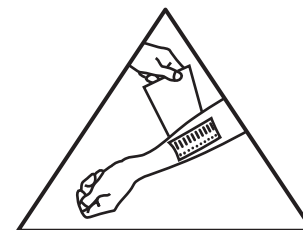

Zabezpiecz wodoodpornym
bandażem

Zawartość: 1% Melaleuca alt. (olejek z drzewa herbacianego), woda oczyszczona (96%).

Zastosowanie: Oparzenia, oparzenia wodą i parą wodną. Przeciwdziała infekcji. Minimalizuje urazy i uszkodzenia skóry. Przynosi ulgę w bólu. Ma działanie lecznicze, nawilżające, chłodzące i łagodzące. Nie przykleja się. Nietoksyczny.

Uwaga: Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Skonsultować się z lekarzem.


Bezpieczny do stosowania u dzieci i na oparzenia twarzy.



REF 900906

STERILE R

CE 0425

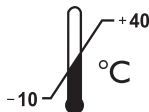

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Żołąty 11, 02-815 Warszawa
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
www.paramedica.pl



BURNSHIELD (PTY) LTD, PO Box 14737 Wadeville 1422 RPA

Rozprowadzany przez: LEVTRADE INTERNATIONAL (PTY) LTD, tel: (+27 11) 440 5171 Wyprodukowano w RPA

EC REP BURNSHIELD INTERNATIONAL LIMITED, Beaumont Hse, Paragon Ave, Wakefield WF1 2UF, DX15011 UK


200 x 200 mm

Żel 120 g









Otwórz opakowanie

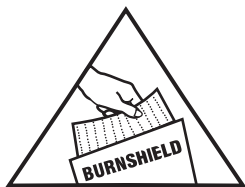


Wymij opatrunek

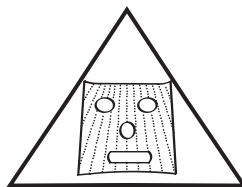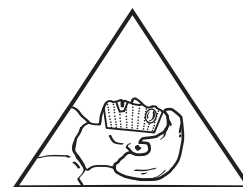Wytnij otwory, by
dopasować opatrunek
do twarzy


Przyłóż w oparzone miejsce

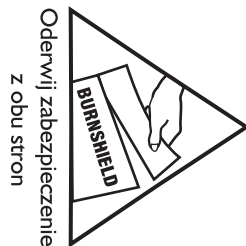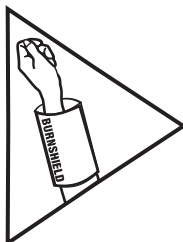Oderwij zabezpieczenie
z obu stron

Nałóż rękaw na ramię

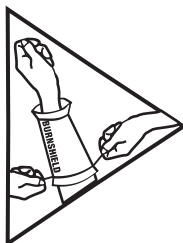


Zabezpiecz z obu stron

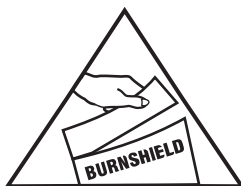


Otwórz opakowanie





Wsuń dłonie

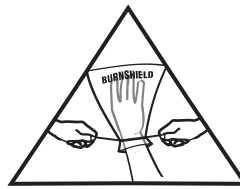

Zabezpiecz

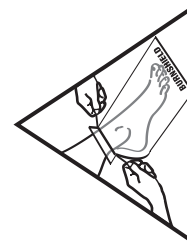

Zaklej taśmą

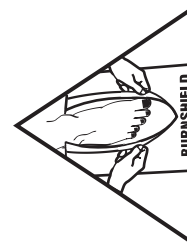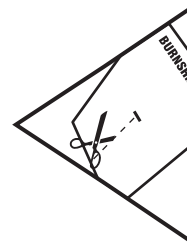Otwórz w celu
wsunięcia stopyRozetnij, by otworzyć
opakowanie