

Instrukcja użytkowania i konserwacji

**Łopatki laryngoskopu
światłowodowego (do użytku
jednorazowego wyłącznie u jednego
pacjenta)**

**Wyłącznie do użytkowania przez
fachowy personel medyczny**



Long Life
SURGICAL INDUSTRIES

**Fateh Garh Agency, Rawail Garh,
Defence Road, Sialkot 51310,
PAKISTAN.**

Ph : 92-52-3562932

E-mail: info@tonglife.com.pk

**Strona internetowa:
www.longlife.com.pk**

Data wydania: 01.07.14-1

Nr kat.	Opis
AL-1851-01	Łopatka Macintosh 1, jedn. użytku
AL-1851-02	Łopatka Macintosh 2, jedn. użytku
AL-1851-03	Łopatka Macintosh 3, jedn. użytku
AL-1851-04	Łopatka Macintosh 4, jedn. użytku
AL-1851-05	Łopatka Macintosh 5, jedn. użytku

OŚWIETLENIE ŚWIATŁOWODOWE

Łopatki wyposażone są w oświetlenie światłowodowe (zimne światło).

PRZEZNACZENIE

Laryngoskop przeznaczony jest do wspomagania wprowadzenia rurki tracheotomijnej przez usta, przez osoby upoważnione i wykwalifikowane.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM

- Upewnić się, czy łopatka nie jest uszkodzona.
- Połączyć łopatkę z uchwytem i sprawdzić, czy miejsce połączenia przesuwa się bez oporów przez blokadę uchwyty.
- Zatrzasnąć łopatkę w żądanej pozycji.
- Sprawdzić działanie oświetlenia.

Laryngoskop jest teraz gotowy do użytku.

Zdejmowanie łopatki z uchwytu odbywa się w odwrotnej kolejności.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w sposób uporządkowany w czystym i suchym miejscu.

WYJAŁAWIANIE

Produkt dostarczany jest w postaci nie jałowej.

Jeśli konieczne jest wyjałowienie produktu, możliwe jest zastosowanie sterylizacji tlenkiem etylenu.

Cykl 100% ETO

Stężenie ETO: 850 ± 50 mg/l

Temperatura: 37°C - 47°C przez 3-4 godziny

Wilgotność względna: min. 70% RH



PRZESTROGI

- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nieprawidłowe użytkowanie może uszkodzić produkt i może spowodować uraz pacjenta.
- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny.
- Wybór odpowiedniego instrumentu w zależności od zastosowanej techniki intubacji leży w zakresie odpowiedzialności lekarza.
- Produkty są opracowywane i wytwarzane jako przeznaczone do użytku wyłącznie u jednego pacjenta.
- Lekarz ponosi odpowiedzialność za decyzję o powtórny użyciu produktu.

SYMBOLE zastosowane na etykiecie



Producent



Kod kreskowy



Data produkcji



Wykorzystać do



Sprawdzić w instrukcji obsługi



Numer katalogowy



Nie używać повторно



Nie zawiera lateksu



Uwaga / Przewrogi



Wyrób nie jałowy



Chronić przed wilgocią



Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem



Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej



Produkt spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy 93/42/EWG oraz normy BS EN ISO 7376:2009

PO UŻYCIU

Łopatki laryngoskopu można usuwać z innymi odpadami stałymi.

